

SporView®

Test biologiczny BI ampułkowy test VH_2O_2 plazma

opis produktu

Wskaźnik biologiczny VH_2O_2 zawiera określoną ilość 7953 (1) *Geobacillus stearothermophilus* 10^6 spor bakterii zaszczerpionych na krążku plastikowym i umieszczonych wewnątrz termoplastycznej tubki, w której znajduje się także szklana kruszalna ampułka wypełniona pożywką kulturową koloru fioletowego. Na zewnątrz testu umieszczono łatwo odklejalną etykietę, na której znajduje się wskaźnik klasy 1, który, gdy zostanie wystawiony na czynnik sterylizujący, zmieni swoje zabarwienie z różowego na niebieski.

Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value.

sposób użycia i odczyt wyników

Test BI należy umieścić w opakowaniu typu TYVEK lub SMS, a następnie włożyć go do sterylizatora, pomiędzy sterylizowane pakiety. Poddać ładunek cyklowi sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Po przeprowadzonym procesie sterylizacji należy aktywować pożywkę BI poprzez rozkruszenie ampułki, a następnie poddać test inkubacji w temp. 55-60°C przez 24 godziny.

Jeżeli proces sterylizacji przebiegł prawidłowo, nie powinna nastąpić zmiana koloru pożywki. W przypadku gdy spory przeżyją, nastąpi zmiana koloru pożywki na żółty, co oznacza, że proces przeszedł nieprawidłowo.

obszary zastosowań

Sterylizatory plazmowe VH_2O_2 różnych typów, m.in.: Sterrad, Plasmed, Steris. BI może być inkubowany we wszystkich dostępnych inkubatorach, m.in. 3M, Browne, J&J, SPS medical.

wytwórca

SPS medical / CROSSTEX® USA



normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11138-1 EN-867-3 ANSI/AMII ST46: 2002	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 15 miesięcy od daty produkcji.	Ampułkowy test VH_2O_2 BI: VH50 50 szt. w opakowaniu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu