

Wash-Checks™ U

testy kontroli mycia ultradźwiękowego

opis produktu

Innowacyjne testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia poprzez kawitację oraz efektywności działania detergentów w myjniach ultradźwiękowych każdego typu. Testy Wash-Checks™ U są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883.

Testy są bezpieczne dla użytkownika i nie zawierają komponentów krwi, a substancja wskaźnikowa koloru niebieskiego zaprojektowana została w taki sposób, aby maksymalnie krytycznie ocenić skuteczność działania głowic ultradźwiękowych. Efekt czyszczący w kąpeli ultradźwiękowej uzyskiwany przez kawitację powoduje wyplukanie niebieskiej substancji testowej.

Wskaźnik kontrolny umieszczony jest na specjalnej, cienkiej płytce metalowej, która doskonale nadaje się do archiwizacji, a niski koszt monitorowania procesów mycia pozawala na częste używanie testów. Zaleca się używanie testów kontroli mycia cyklicznie w ciągu dnia, razem z pełnym wsadem, oraz raz w tygodniu przy pustej myjni. Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem.

Wszystkie wskaźniki posiadają indywidualny numer seryjny.

sposób użycia i odczyt wyników

Jeśli myjnia działa w sposób właściwy, to substancja wskaźnikowa zostanie usunięta podczas procesu mycia. Pozostałość niebieskiego zabrudzenia na teście może oznaczać, iż myjnia ultradźwiękowa działa niewłaściwie.

obszary zastosowań

Myjnie ultradźwiękowe wszystkich typów.



Przed myciem



Po nieefektywnym myciu



Po efektywnym myciu



Uchwyt

normy

ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003,
ISO 15 883

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temperaturze
poniżej 25°C.

Okres przydatności:
2 lata od daty produkcji.

numer katalogowy i opakowanie

Test - WC108:
50 szt. w opakowaniu
Uchwyt H - WC102:
1 szt.