

Kontrola mycia

test kontroli mycia maszynowego narzędzi

opis produktu


Wskaźnik TOSI służy do monitorowania skuteczności mycia w urządzeniach myjąco- dezynfekujących. Jest to pierwszy wskaźnik z naniesioną substancją wskaźnikową kompatybilną ze składem krwi ludzkiej. Substancja ta została umieszczona na metalowej płytce ze stali szlachetnej. Zewnętrzna przezroczysta obudowa utrudnia dostęp czynnika myjącego, a jednocześnie umożliwia łatwą i precyzyjną wzrokową interpretację wyników. Specjalne zaczepy pozwalają na umieszczenie testu w dowolnym punkcie urządzenia myjącego.

sposób użycia i odczyt wyników

Test należy wyjąć z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem, a następnie wpiąć go za pomocą uchwytów w wybranym miejscu urządzenia myjąco- dezynfekującego. Poddać test procesowi mycia wraz z narzędziami chirurgicznymi. Po zakończonym procesie należy dokonać oceny wzrokowej. Optymalny wynik to brak widocznych zabrudzeń na płytce kontrolnej. Pozostawione jakiegokolwiek pozostałości na teście wskazują na niewystarczającą skuteczność procesu mycia.

obszary zastosowań

Myjnie maszynowe wszystkich typów.

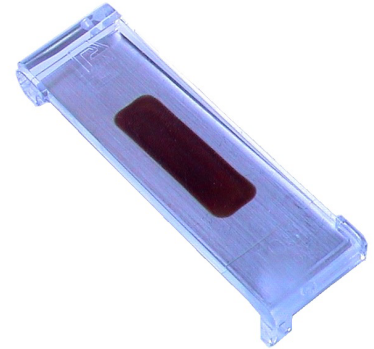

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
EN ISO 15883	Przechowywać w temperaturze 2-25°C, w zamkniętej folii ochronnej, z dala od środków dezynfekujących.	test kontroli mycia TOSI: 8302 12 szt. w opakowaniu