

FOTELE GINEKOLOGICZNE I LEŻANKI JORDAN

RESI[®]
www.resi.cz



JORDAN[®]
TRADITIONAL COUCH BRAND


Fotele ginekologiczne i leżanki JORDAN

Mamy przyjemność przedstawić Państwu innowacyjną linię foteli ginekologicznych JORDAN firmy RESI Třeboň spol. s r.o., które zostały zaprojektowane z myślą o przeprowadzaniu prostych zabiegów, a po uzupełnieniu foteli o elementy wyposażenia dodatkowego możliwe jest także przeprowadzanie zabiegów w znieczuleniu. Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji fotela dzięki dostępności szerokiej gamy tapicerek a także wyboru odcienia konstrukcji spośród dostępnej palety kolorystycznej. Ustawianie fotela w wymaganej pozycji może odbywać się przy pełnym jego obciążeniu mechanicznie lub za pomocą sterowników elektrycznych w zależności od rodzaju fotela.

W folderze mają Państwo możliwość zapoznania się z podstawowym wyposażeniem foteli a także z dostępnymi akcesoriami dodatkowymi, dzięki czemu wybór odpowiedniej konfiguracji wyposażenia nie powinien nastęrczać żadnych problemów.



podkolanniki z zawiasem kulowym

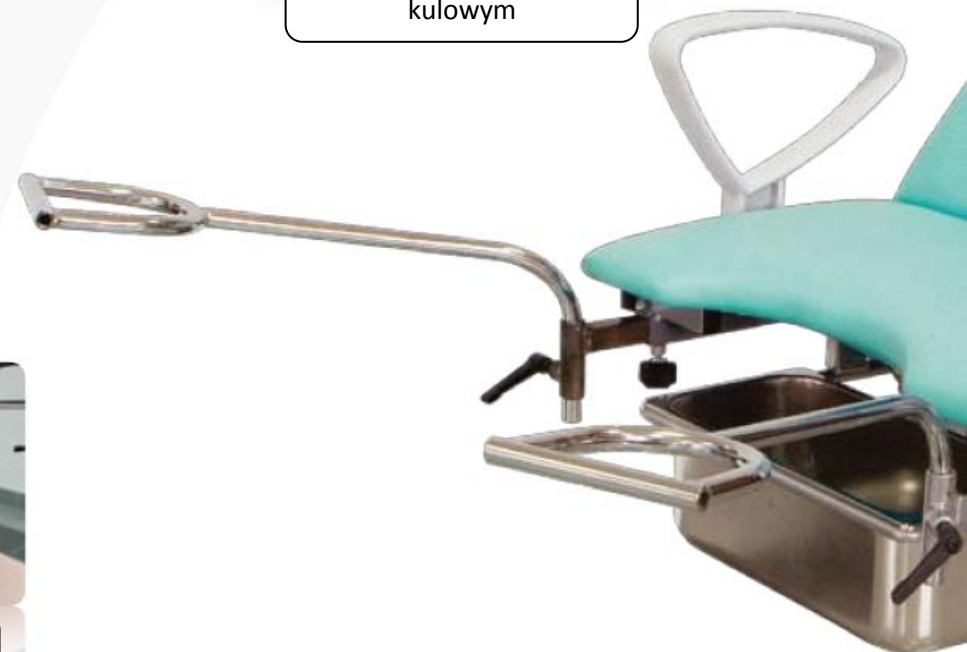

podłokietnik do wkłuwań



stopeń wejściowy



nierdzewna misa ginekologiczna





uchwyt na papier w rolce



chromowane strzemiona



zdemowana płyta leża



regulowany zagłówek



nożne sterowniki
funkcji elektrycznych



pozycja Trendelenburga

JORDAN H

Model podstawowy linii foteli ginekologicznych JORDAN z nieregulowaną wysokością.

Wysokość tego fotela ginekologicznego może zostać dostosowana do potrzeb i wymagań klienta. Nachylenie segmentu oparcia fotela regulowane jest mechanicznie. Dostosowanie kąta nachylenia możliwe jest z obydwu stron fotela w zakresie od -10° do 70° . W tylnej części segmentu oparcia znajduje się uchwyt na papier higieniczny w rolce. Regulacja nachylenia segmentu siedziska odbywa się mechanicznie w zakresie 0° do 10° . Z obydwu stron siedziska znajdują się podłokietniki, których wysokość można regulować. Model podstawowy fotela wyposażony jest w chromowane strzemiona. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są także podkolanniki wykonane z tworzywa sztucznego (poliuretan) z zawiasem kulowym, dzięki któremu podkolannik może być ustawiony i zablokowany w wymaganej pozycji. Nierdzewna misa ginekologiczna znajduje się pod segmentem siedziska. Fotel wyposażony jest także w stopień wejściowy dla bardziej komfortowego wchodzenia na fotel.

Specyfikacja techniczna modelu podstawowego

wymiary: 127 x 65 cm

ustalona wysokość fotela dostosowana do potrzeb klienta

chromowane strzemiona pod stopy

nierdzewna misa ginekologiczna

uchwyt na papier w rolce

stopień wejściowy

regulowane i zdejmowane podłokietniki

regulowany zagłówek

mechaniczna regulacja segmentu siedziska

pozycja Trendelenburga

Wyposażenie dodatkowe:

eurolistwy na akcesoria dodatkowe

uchwyt mocujący akcesoria dodatkowe na eurolistwie

uchwyt kolposkopu

podkolanniki bez zawiasu kulowego

podkolanniki z zawiasem kulowym


zdejmowana płyta leża

tapicerowany podłokietnik do wkłuwań



JORDAN H2e

Fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości.

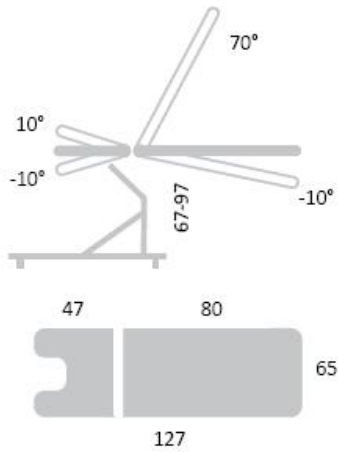

Fotel posiada regulację wysokości w zakresie 67 cm - 97 cm, regulacja możliwa jest przy użyciu sterownika ręcznego lub nożnego (wyposażenie dodatkowe). Nachylenie segmentu oparcia fotela regulowane jest mechanicznie. Dostosowanie kąta nachylenia możliwe jest z obydwu stron fotela w zakresie od -10° do 70°. W tylnej części segmentu oparcia znajduje się uchwyt na papier higieniczny w rolce. Regulacja nachylenia segmentu siedziska odbywa się mechanicznie w zakresie 0° do 10°. Z obydwu stron siedziska znajdują się podłokietniki, których wysokość można regulować.

Model podstawowy fotela wyposażony jest w chromowane strzemiona. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są także podkolanniki wykonane z tworzywa sztucznego (poliuretan) z zawiasem kulowym, dzięki któremu podkolannik może być ustawiony i zablokowany w wymaganej pozycji. Nierdzewna misa ginekologiczna znajduje się pod segmentem siedziska. Fotel może być wyposażony w stopień wejściowy dla bardziej komfortowego wchodzenia na fotel (wyposażenie dodatkowe).

Specyfikacja techniczna modelu podstawowego

wymiary: 127 x 65 cm

elektryczna regulacja wysokości fotela

mechaniczna regulacja segmentu siedziska

sterownik ręczny do regulacji wysokości

chromowane strzemiona pod stopy

nierdzewna misa ginekologiczna

uchwyt na papier w rolce

regulowane i zdejmowane podłokietniki

regulowany zagłówek

pozycja Trendelenburga

Wyposażenie dodatkowe:

eurolistwy na akcesoria dodatkowe

uchwyt mocujący akcesoria dodatkowe na eurolistwie

uchwyt kolposkopu

podkolanniki bez zawiasu kulowego

podkolanniki z zawiasem kulowym

nożne sterowniki funkcji elektrycznych

stopień wejściowy

zdejmowana płyta leża

tapicerowany podłokietnik do wkłuwań

JORDAN H23e

Elektrycznie regulowany fotel ginekologiczny – leżanka.

Fotel posiada regulację wysokości w zakresie 65 cm - 95 cm, regulacja możliwa jest przy użyciu sterownika ręcznego lub nożnego (wyposażenie dodatkowe). Regulacja nachylenia segmentu siedziska odbywa się elektrycznie w zakresie -10° do 40° . Z obydwu stron siedziska znajdują się zdejmowane podłokietniki, których wysokość można regulować. W tylnej części segmentu oparcia znajduje się uchwyt na papier higieniczny w rolce. Nachylenie segmentu oparcia regulowane jest elektrycznie w zakresie od -10° do 65° .

Model podstawowy fotela wyposażony jest w chromowane strzemiona. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są podkolanniki wykonane z tworzywa sztucznego (poliuretan) z zawiasem kulowym, dzięki któremu podkolannik może być ustawiony i zablokowany w wymaganej pozycji. Nierdzewna misa ginekologiczna znajduje się pod segmentem siedziska. Po zdjęciu miski możliwe jest zamontowanie płyty leża (wyposażenie dodatkowe), dzięki której możliwe jest uzyskanie pozycji leżącej. Fotel może być wyposażony w stopień wejściowy (wyposażenie dodatkowe).

Specyfikacja techniczna modelu podstawowego

wymiary: 195 x 70 cm

elektryczna regulacja wysokości fotela

elektryczna regulacja nachylenia segmentów siedziska i oparcia

sterownik ręczny do regulacji funkcji elektrycznych

chromowane strzemiona pod stopy

nierdzewna misa ginekologiczna

uchwyt na papier w rolce

regulowane i zdejmowane podłokietniki

regulowany zagłówek

pozycja Trendelenburga

Wyposażenie dodatkowe:

eurolistwy na akcesoria dodatkowe

uchwyt mocujący akcesoria dodatkowe na eurolistwie

uchwyt kolposkopu

podkolanniki bez zawiasu kulowego

podkolanniki z zawiasem kulowym

nożne sterowniki funkcji elektrycznych, osobno do regulacji:

segmentu oparcia, siedziska i regulacji wysokości

stopień wejściowy

zdejmowana płyta leża


tapicerowany podłokietnik do wkłuwań



pozycja Trendelenburga



pozycja Trendelenburga

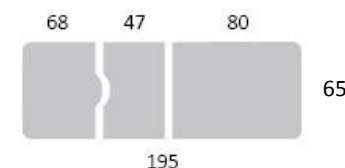

65

Wzornik tapicerek – powierzchnia wyjątkowo odporna na ścieranie i odbarwienia (koszt tkanin typu V i C wliczony jest w podstawową cenę fotela.
Natomiast obicia typu H i N dostępne są za dopłatą)



Wzornik kolorystyki ram konstrukcyjnych (koszt wliczony w podstawową cenę fotela)



RESI Třeboň spol. s r.o.
Konviktská 291/24
110 00 PRAHA 1 - Staré Město
Czech Republic

WSPARCIE DLA CIEBIE I TWOICH PACJENTÓW

Correspondence address, Production plant
RESI Třeboň spol. s r.o.
Novohradská 1153
379 01 Třeboň, Czech Republic
Tel.: 384 724 292, fax: 384 724 293

REHABILITATION COUCHES ● TRACTION AND TILTING TABLES ● EXAMINATION TABLES ● GYNECOLOGIC CHAIRS
MASSAGE TABLES ● FOLDING MASSAGING COUCHES ● VOJTA'S TABLES ● STEPS AND PARALLEL ● BARS ● PHYSIOTHERAPY