

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla sterylizowanych materiałów medycznych

opis produktu

System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5. Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m², zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejenie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia. Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM i EO typ 1.

Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia.

Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną.

przeznaczenie opakowań ULTRA®

- tace narzędziowe
- kosze na implanty
- narzędzia okulistyczne
- duże i ciężkie zestawy
- narzędzia delikatne i złożone

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe oraz niskotemperaturowe różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.



normy

ISO 11607-1
PN EN 868 -5
ISO 9001
Dyrektywa CE 93/42
Klasa 1 wyrób medyczny niesterylny,
CE

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu,
w oryginalnym opakowaniu,
zdala od źródeł światła,
w temperaturze 10-40°C.
Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii
umieszczone na opakowaniu zbiorczym.
Numer serii umieszczony na rękawie.

Ultra®

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla sterylizowanych materiałów medycznych

■ rękawy ULTRA®

99ULT09070	90mm x 70 m	3 rolki w kartonie
99ULT12070	120mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT16070	160mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT21070	210mm x 70 m	2 rolki w kartonie
99ULT27070	270mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT32070	320mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT38070	380mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT42070	420mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT47070	470mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT52070	520mm x 70 m	1 rolka w kartonie
99ULT58070	580mm x 70 m	1 rolka w kartonie

■ torebki ULTRA®

98ULT01634	160 x 340 mm	1000 sztuk w opakowaniu
98ULT02242	225 x 420 mm	500 sztuk w opakowaniu
98ULT02845	285 x 450 mm	500 sztuk w opakowaniu
98ULT03250	320 x 500 mm	500 sztuk w opakowaniu



Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w myśl prawa handlowego.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu