

# Wrap tape

## Taśmy sterylizacyjne samoprzylepne taśmy zabezpieczające

### opis produktu

Taśmy samoprzylepne ze specjalnego, supermocnego krepowanego papieru z naniesioną warstwą kleju, gwarantującego ich dobre przyleganie do różnych powierzchni m. in. papieru, włókniny, folii lub metalu, służą do zabezpieczenia sterylizowanych pakietów przed niekontrolowanym otwarciem. Dostępne są różne rodzaje taśm: do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, gorącym powietrzem lub plazmą  $H_2O_2$ . Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. Wskaźniki chemiczne na taśmach są testami klasy A wg ISO 11140- sygnalizują jedynie fakt poddania procesowi sterylizacji, jednak nie wykazują jego skuteczności. Taśmy zachowują doskonale parametry fizyczne i nie odklejają się podczas procesu; można je łatwo odkleić od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego uszkodzenia

### sposób użycia i odczyt wyników

Pakiet zawinięty papierem krepowanym, włókniną lub SMSem należy okleić taśmą na całej jego długości i szerokości, w taki sposób, aby końcówki taśmy zachodziły na siebie na odcinku minimum 10cm.

Po przeprowadzonym procesie sterylizacji powinna nastąpić zmiana barwy wskaźnika na taśmie:

Plazma- z różowego na niebieski


Para wodna- z kremowego na brązowy

Tlenek etylenu- z brązowego na zielony

Gorące powietrze- z zielonego na czarny

### obszary zastosowań

sterylizatory parowe, gazowe, plazmowe  $H_2O_2$  oraz na suche powietrze różnych typów

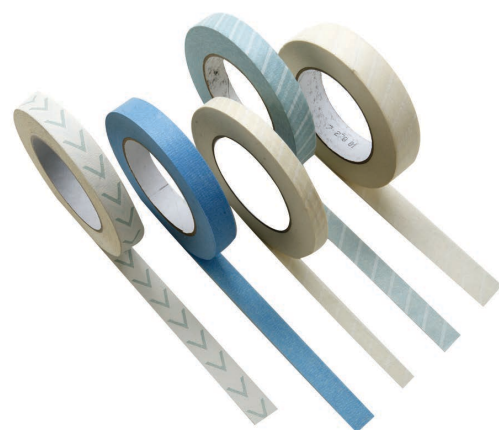

### normy

ISO 11140-1, klasa 1  
EN 867-1, klasa A

### przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności umieszczony na etykiecie produktu.

### numer katalogowy i opakowanie

**ST-072**- para wodna, 1,2cm x 55m  
**ST-048**- para wodna, 1,9cm x 55m  
**ST-036**- para wodna, 2,5cm x 55m  
**GT-048**- tlenek etylenu, 1,9cm x 50m  
**DT-048**- gorące powietrze, 1,9cm x 50m  
**TH-048**- plazma  $H_2O_2$ , 1,9cm x 50m  
**1096**- bez wskaźnika, niebieska, 1,9cm x 50m  
**1097N**- bez wskaźnika, niebieska, 2,5cm x 50m