

WSPOMAGANIE JAKOŚCI W RAD / FLU

Uchwyt do fantomów EN-DIN 6868-13: MONTI

Funkcje:

- Mocowanie fantomów DIEGO i równoważnych na statywach płucnych
- Używany w radiografii analogowej i cyfrowej
- Używany w kombinacji z fantomami DIEGO i ALDO

Sposób użycia:

Wsunąć fantom zgodny z EN-DIN 6868-13
w prowadnice uchwytu MONTI



Dokręcić śruby dociskowe uchwytu
MONTI



Zawiesić uchwyt na statywie płuc nym
i wyregulować położenie fantomu
względem detektora obrazu.



Wyłączny przedstawiciel do Polski:

HIMTECH QC Norbert Wasilewski
ul. Woziwody 8, 02-908 Warszawa
tel.+48602108829 fax.+48222034686
www.himtech.info
info.himtech@gmail.com

