



"THE SECRET
of
my skin !"

"This unique Fractional RF Microneedling
Technology brings a new life to your skin"

All New
INTRAcEel™

Jeisys

Monopolarny system dopasowania impedancji

Pomiar impedancji jest kluczowy dla zabiegów metodą monopolarną. Urządzenie INTRAcEel posiada system kontroli przekazywania energii (ERS) bazujący na pomiarze impedancji skóry. System taki jest niezbędny do zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa zabiegów.


Obraz przed i po zabiegu z zastosowaniem systemu ERS



Mikro-igłowa frakcyjna technologia RF z systemem TLT i ERS

Przeprowadzenie mikro-igłowych zabiegów frakcyjnych w technologii RF przynosi szybkie oraz trwałe efekty terapeutyczne dzięki połączeniu zabiegów monopolarnych, bipolarnych i oraz zabiegów odmładzania powierzchniowego.

Denaturacja i koagulacja energią RF w systemie monopolarnym i bipolarnym

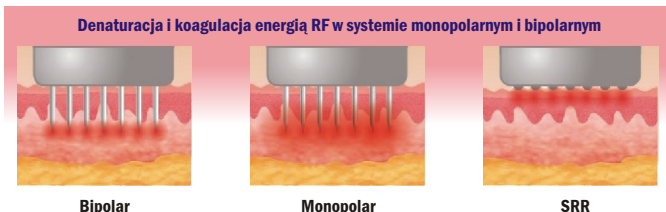

Bipolar

Monopolar

SRR

TLT: Three Layer Therapy ERS: Energy Reward System



"Original FRM technology
from its inventor"

Complete **Three Layer Therapy**
By **SRR**(Superficial RF Rejuvenation) **Tip**

All New
INTRAcel™

SRR-Superficial Mode

FRM-Bipolar Mode


FRM-Monopolar Mode

Impedance matching




Łączona terapia wielofazowa

1. Inwazyjny zabieg RF skóry

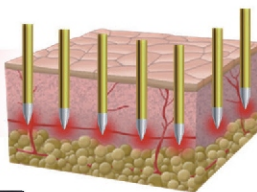


Mikro-igły dostarczają energię RF doprowadzając do powstania mikro-stref nekrozy na skutek koagulacji. W efekcie powodują regenerację tkanki skóry właściwej

2. Zabieg SRR RF naskórka

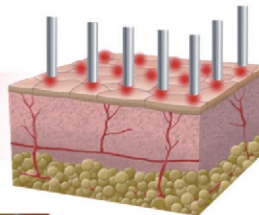

Punkty kontaktowe dostarczają energię RF powierzchniowo. W efekcie następuje wygładzenie zmarszczek oraz tonowanie skóry

3. Terapia łączona

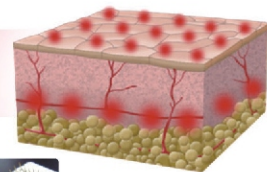


Połączenie zabiegu inwazyjnego oraz powierzchniowego. W efekcie otrzymujemy regenerację naskórka i skóry właściwej

INTRAcel™

Oryginalna technologia FRM prosto od jej wynalazcy

Frakcyjny system mikro-igłowy RF zapewnia doskonałą skutecznością w odmładzaniu skóry, redukcji porów, trądziku i blizn potrądzikowych, poprzez selektywne oddziaływanie na różnej głębokości skóry. Dodatkowo, energia RF wytwarza wystarczającą ilość ciepła do denaturacji komórek i likwidowania przyczyn trądziku, oraz bakterii z gruczołów łojowych. Penetracja preparatów takich jak EGF, kwas hialuronowy, Placenta, peptydów miedzi i fulerenów jest również łatwiejsza poprzez kolumny utworzone w trakcie terapii INTRAcel. Cechy funkcjonalne INTRAcel takie jak Bipolar, Monopolar i SRR (Powierzchnowe Odmładzanie RF) umożliwiają skuteczne podnoszenie i napinanie skóry, oraz regenerację powierzchniową naskórka.


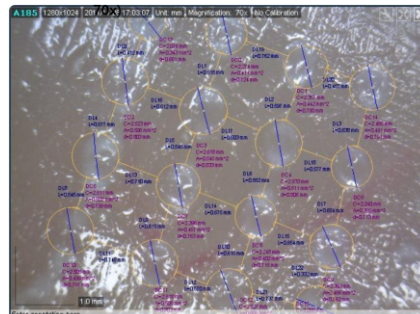


Opatentowana technologia FRM (Fractional RF Microneedle)

- FRM Technology™ to unikalna technika w leczeniu obszaru docelowego poprzez szybką penetrację, specjalnie zaprojektowaną matrycą z izolowanymi mikro-igłami. Najważniejszą cechą tej terapii jest to, że nie powoduje ona istotnych strat w naskórku. Technika ta wywołuje powstanie mikro-stref koagulacji w docelowej tkance, na skutek oddziaływania prądu RF o wysokim natężeniu.

Teoria terapii

- Micro-needling powoduje powstanie kolumnowych mikrouszkodzeń skóry, w wyniku czego uruchomione zostają naturalne mechanizmy regeneracyjne. Skuteczność tej metody podobna jest do laserowych zabiegów ablacyjnych ale obrażenia naskórka są nieporównywalnie mniejsze. W wyniku takiego oddziaływania uzyskujemy bezpieczne leczenie jak przy zabiegu nieablacyjnym oraz minimalizację efektów bólowych.
- Bezpośrednia emisja prądu RF do tkanki docelowej, selektywnie degeneruje włókna kolagenu od powierzchni przez skórę właściwą do zespołu mięśni. W efekcie następuje natychmiastowe obkurczenie włókien kolagenu, oraz produkcja nowego kolagenu, poprzez stymulację fibroblastów.
- Dodatkowym zaletą tej terapii jest istotna poprawa efektywności przekazywania niezbędnych substancji na poziomie komórkowym.

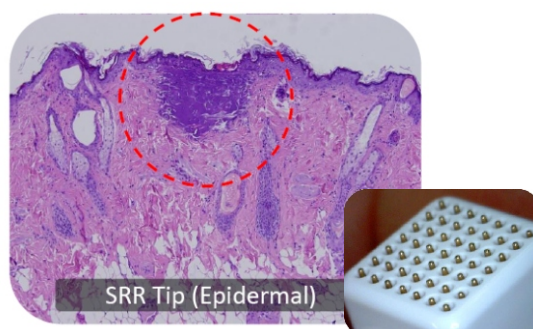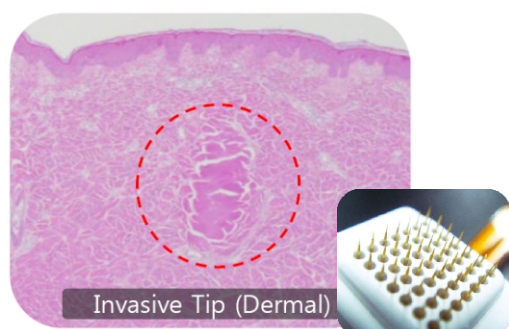



INTRAcceL™

Jeisys

Parametry techniczne:

model : JSMD-EX10 V-1	
Typ urządzenia:	mikro-igłowy medyczny system RF
Rodzaj pracy:	pieczętkowy
Rodzaj emisji prądu RF:	bipolarny, monopolarny, SRR
Częstotliwość prądu RF:	1 [MHz]
Moc na tkance - monopolar:	do 700 [W]
Moc na tkance - bipolar:	do 700 [W]
Czas ekspozycji:	40 - 5000 [ms]
Igły w matrycy:	49 igieł izolowanych do ostrza, średnica 0,2 [mm]
Wielkość pola zabiegowego:	10 x 10 [mm]
Rodzaje tipów:	FRM bipolar, FRM monopolar, SRR superfacial
Głębokość penetracji:	0,5 - 2,0 [mm]
Zasilanie:	230 [V] AC / 50-60 [Hz]
Wymiary:	350 x 405 x 1080 [mm]
Waga:	63 [kg]

FINANSOWANIE

Naszym klientom zapewniamy możliwość finansowania zakupów na atrakcyjnych i uproszczonych warunkach kredytowych. Kredyty dla lekarzy wymagają jedynie dokumentów rejestrowych i prawa wykonywania zawodu

INNOWACYJNOŚĆ

Klientom starającym się o dotacje unijne udostępniamy niezależne świadectwa innowacyjności dla wybranych laserów

2013 05 v1

LASERY MEDYCZNE

USUWANIE OWŁOSIENIA

USUWANIE TATUAŻY

USUWANIE PAJĄCZKÓW

ZAMYKANIE NACZYŃ

FOTO - ODMŁADZANIE

METODY FRAKCYJNE

MEDYCYNĄ ESTETYCZNA

STOMATOLOGIA

FIZYKOTERAPIA

www.eslt-medical.com
info@eslt-medical.com

Wycóżki 31,
Ursynów
02-820 WARSZAWA,
POLAND
TEL +48 22 8265408
FAX +48 22 6255785
KOM +48 512 157663

ESLT
electric system & laser technology