

PeraVir N

Preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz powierzchni

Czas działania **10 MINUT**



ZAKRES DZIAŁANIA

- bakteriobójczy
- prątkobójczy
- grzybobójczy
- wirusobójczy
- sporobójczy

DOSTĘPNY W OPAKOWANIACH
500 g, 1 kg

BEZPIECZNY

NIEKOROZYJNY

BIODEGRADOWALNY

PeraVir N

Niekorozyjny środek o działaniu sporobójczym do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz powierzchni w czasie 10 minut

PeraVir N jest środkiem utleniającym, ulegającym biodegradacji, rozpuszczalnym w wodzie, o słabo zasadowym pH, do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz powierzchni objętych Dyrektywą 93/42/EEC z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

PeraVir N zaleca się stosować przede wszystkim w:

- szpitalach zakaźnych, w tym szpitalach gruźlicy i chorób płuc
- oddziałach septycznych
- blokach operacyjnych
- oddziałach transplantologii
- oddziałach rehabilitacji
- wszystkich pomieszczeniach i miejscach, gdzie wymagana jest eliminacja, z powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, wirusów, grzybów, bakterii z prątkami gruźlicy włącznie oraz spor.

PeraVir N jest rozpuszczalny w letniej wodzie wodociągowej. Ulega chemicznej reakcji prowadzącej do powstania anionów utleniających, które w czasie 10 minut zapewniają działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Organiczne komponenty stabilizujące w PeraVir N zwiększają trwałość roztworu. Może być on użyty do 30 godzin od przygotowania. Substancje powierzchniowo czynne umożliwiają kontakt z każdą fosfolipidową membraną i ułatwiają przenikanie substancji czynnej w strukturę komórek oraz zniszczenie wszystkich rodzajów drobnoustrojów, również w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, ropa, moc, kał).

SKŁAD PREPARATU (w 100 g proszku)

Nadwęglan sodu > 40 g, TAED > 25 g.
Kwas organiczny, substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, stabilizatory (do 100 g).

ZASTOSOWANIE

Zaleca się stosować roztwór 1% w czasie 10 minut. W przypadku obecności grzybów pleśniowych należy użyć roztworu 2% w czasie 10 minut.

Uwaga: Nie stosować do dezynfekcji powierzchni wykonanych z miedzi i mosiądzu.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO:

- przygotować odpowiednią ilość letniej wody (można użyć wody z kranu),
- odpowiednią ilość proszku PeraVir N wsypać do naczynia z wodą i dokładnie mieszać do dna przez ok. 2-3 minuty.

CZAS TRWAŁOŚCI ROZTWORU

Roztwory można zastosować do 30 godzin od przygotowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Wyroby medyczne o małych rozmiarach zanurzyć w roztworze na 10 minut, umyć w tym samym roztworze, a następnie wypłukać w wodzie i wysuszyć.

We wszystkich innych przypadkach zmyć powierzchnie roztworem, a po 10 minutach spłukać wodą.

DZIAŁANIE BIOBÓJCZE

PeraVir N został przebadany zgodnie z obowiązującymi Normami Europejskimi w warunkach brudnych.

Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli:

Zakres działania	Norma EN	Organizm	Czas kontaktu (minuty)	Stężenie (%)
Bakteriobójczy	13727	Staphylococcus aureus	10	0,25
		Pseudomonas aeruginosa	10	0,25
		Enterococcus hirae	10	0,25
	14561	Staphylococcus aureus	10	0,25
		Pseudomonas aeruginosa	10	1,00
		Enterococcus hirae	10	0,25
Grzybobójczy	13624	Candida albicans Aspergillus niger	10 10	0,25 2,00
	14562	Candida albicans Aspergillus niger	10 10	0,25 2,00
Prątkobójczy	14348	Mycobacterium terrae	10	1,00
		Mycobacterium avium	10	1,00
	14563	Mycobacterium terrae	10	1,00
		Mycobacterium avium	10	1,00
Wirusobójczy	14476	Wirus polio	10	1,00
		Adenowirus	10	1,00
Sporobójczy	13704	Bacillus subtilis	10	1,00

Opakowania: 500g, 1 kg

Miarka znajduje się wewnątrz opakowania

BIODEGRADOWALNY

PeraVir N jest całkowicie biodegradowalny i nie wymaga żadnych specjalnych sposobów unieszkodliwiania. Roztwór preparatu może być wylany bezpośrednio do kanalizacji.

CERTYFIKATY

PeraVir N jest zarejestrowany jako Wyrób Medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC i posiada Certyfikat CE wydany przez Istituto Superiore di Sanità (Włoski Wyższy Instytut Zdrowia).



0 3 7 3

WYTWÓRCA:

STERIL-4 S.r.l.

Collina del Mare, 50 - 98047 SAPONARA - ITALY

Tel. +39 090.332818 Fax +39 090.3352113

www.steril-4.it

e-mail: export@steril-4.it

DYSTRYBUTOR:

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 8

Tel./Fax (22) 633 95 59

www.naturan.com.pl

e-mail: info@naturan.com.pl

