

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY NAJNOWSZEJ GENERACJI

VirKon®



STOSUJĄC **VirKon®** CHRONISZ SIEBIE I INNYCH

NATURAN®

SKŁAD

VIRKON jest preparatem wieloskładnikowym, zawiera związki powierzchniowo czynne, substancje utleniające, kwasy organiczne, nieorganiczne układy buforujące, stabilizatory i barwnik. Jedną z substancji czynnych jest mononadsiarzan potasu.

ZAKRES STOSOWANIA

VIRKON stosowany jest w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo (włącznie z HIV i HBV). Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo w czasie 15 minut. Może być stosowany do rozlanych płynów ustrojowych i wydaliny. VIRKON zgodnie z podanym sposobem może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wykonanych z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu.

WŁAŚCIWOŚCI

VIRKON jest jasnoróżowym proszkiem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. W stężeniu użytkowym roztwór ma ciemnoróżową barwę, charakteryzuje się właściwościami myjącymi, a także przyjemnym zapachem. Roztwory użytkowe preparatu posiadają kwaśny odczyn, dlatego nie należy ich mieszać z detergentami i innymi związkami chemicznymi o odczynie zasadowym.

VIRKON prawidłowo stosowany nie powoduje schorzeń o podłożu alergicznym (astmy, stanów zapalnych skóry), nie ma właściwości mutagennych i rakotwórczych.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO

- Odmierzoną ilość preparatu wsypać do naczynia lub opryskiwacza napełnionego odpowiednią ilością wody i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku. Zaleca się stosowanie letniej wody (temperatura około 30°C). Przygotowany, nieużywany roztwór VIRKONU może być przechowywany 1 dzień. Zmniejszenie intensywności ciemnoróżowej barwy roztworu świadczy o utracie skuteczności.
- Przy sporządzaniu roztworu należy stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. W czasie wykonywania dezynfekcji zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Przy postępowaniu z proszkiem stosować środki ostrożności podane na etykiecie.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy używaniu roztworu VIRKONU do dezynfekcji przez zanurzenie należy zwrócić uwagę na ilość dezynfekowanego sprzętu i jego zanieczyszczenie materiałem biologicznym. Roztwór należy wymienić, jeżeli ulegnie zmianie intensywność barwy, wystąpi zmętnienie lub osad.

Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie pomieszczeń i sprzętów należy obficie zwilżyć 2% roztworem VIRKONU przy pomocy czystej ścierki, mopa lub opryskiwacza (powierzchnie oczyszczone). Po 10-15 minutach powierzchnie należy przemyć wodą stosując czyste, zdezynfekowane (termicznie) ścierki lub mopy.

Dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego

Zanieczyszczone przedmioty należy:

- zanurzyć na 10 minut w 2% roztworze VIRKONU
- umyć w tym samym roztworze
- wypłukać w ciepłej wodzie i osuszyć.

Przed użyciem, w zależności od przeznaczenia, narzędzia i sprzęt należy wysterylizować lub ponownie zdezynfekować.

UWAGA! Należy ściśle przestrzegać czasu dezynfekcji.

Dezynfekcja rozlanych płynów ustrojowych i wydaliny

Założyć rękawice ochronne. Rozlane płyny posypać równomiernie VIRKONEM w postaci proszku, pozostawić na czas nie krótszy niż 10 minut. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym materiałem (np. serweta, płat ligniny, ręcznik jednorazowego użytku), umieścić w pojemniku z materiałem zakaźnym. Następnie powierzchnię zmyć 2% roztworem VIRKONU. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice, umieścić w pojemniku na odpady zakaźne. Zachować ostrożność: w czasie posypywania nie należy powodować rozpylania proszku! Chronić skórę, oczy i drogi oddechowe.

W związku z minimalną toksycznością roztworu w stężeniu użytkowym i wysoką skutecznością, VIRKON został dopuszczony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie do dezynfekcji i mycia sprzętów oraz narzędzi chirurgicznych w oddziałach położniczych, a także powierzchni i sprzętów, w tym również inkubatorów, w oddziałach noworodkowych i wcześniaków.

Opinia PZH Nr:

HB/69/90, HB/251/91/92, HB/533/00

Wpis do Rejestru wyrobów medycznych: nr PL/CA01 00755

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym: nr 0144/03

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel. (0-22) 633 95 59
fax: (0-22) 633 93 36
www.naturan.com.pl
e-mail: naturan@naturan.com.pl

NATURAN®

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Opole
Poznań
Szczecin
Wrocław

tel./fax: 085 676 38 35
tel./fax: 052 327 78 68
tel./fax: 058 520 26 55
tel./fax: 081 532 05 05
tel./fax: 042 673 38 56
tel./fax: 018 547 44 50
tel./fax: 077 456 44 31
tel./fax: 061 852 44 28
tel./fax: 091 487 15 67
tel./fax: 071 327 64 03