

CareBag URI

z super chłonną wkładką



Stosowanie ekonomicznych, jednorazowych kaczek męskich CareBag® Men's Urinal z super chłonną wkładką ma wpływ na środowisko - zmniejsza ryzyko kontaktu i jego skażenia. Unikalna super chłonna wkładka zmienia do 450 ml moczu w żel w kilka sekund. Spowalniając proces rozpadu moczu i obniżając utlenianie, żel znacząco redukuje nieprzyjemny zapach i ryzyko bezpośredniego kontaktu.

- Gotowe do użycia
- Wchłaniają od 500 do 1000 ml moczu
- Zwiększają komfort i wygodę pacjenta w porównaniu z tradycyjną kaczką
- Bezpieczne w transporcie - bez ryzyka rozlania czy rozchlapania zawartości
- Zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych i związane z tym koszty
- Minimalna przestrzeń przechowywania w porównaniu z kaczkami tradycyjnymi
- Eliminują przykry zapach
- Łatwe w użyciu i bardziej dyskretne od tradycyjnych kaczek męskich
- Minimalizują ryzyko bezpośredniego kontaktu z zawartością
- Eliminują nieprzyjemne dla personelu czynności
- Umożliwiają pomiar ilości

Idealne do użycia:

- w opiece domowej lub Domach Opieki
- podczas transportu pacjenta
- na oddziale urologicznym lub podczas dializy
- na oddziałach przed i pooperacyjnych
- w przychodniach i klinikach
- w centrach rehabilitacyjnych
- na oddziale ortopedycznym
- w opiece paliatywnej
- przez policję, straż pożarną, ratowników medycznych

Skład

Włóknina z pulpy i polimerów akrylowych.

Instrukcja użycia:

1. Suchymi rękoma otworzyć pudełko i wyjąć torebkę z wkładką GelMax.
2. Podać kaczkę pacjentowi płci męskiej.
3. Po oddaniu moczu odczekać kilka sekund aż zawartość torebki zmieni się na galaretowatą substancję.
4. Torebkę zawiązać za pomocą sznureczków, wyrzucić jako odpad komunalny.

Środki ostrożności

Produkt jednorazowy. NIE używać ponownie.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać mając mokre ręce.

Identyfikacja i data ważności

Każdą paczkę identyfikuje numer referencyjny/numer partii i data ważności (5 lat).

Bezpieczeństwo

Produkt nie zaliczany do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Zgodność

- Produkt Klasy I, zwolniony z obowiązku wpisu do Wykazu produktów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami FDA
- Zgodny z Dyrektywą 93/42/CEE dotyczącą wyrobów medycznych – Klasa I
- Podczas spalania produkt nie wydziela żadnych chlorków ani innych produktów ubocznych mogących wytwarzać dioksyny
- Kod celny: 5603149090
- Certyfikacja firmy: ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003



| | |
|---|--|
| Producent: Cleanis 73 rue du Cherche Midi 75006 Paryż, Francja Tel. +33(0)1 42 84 38 21 Fax. +33(0)1 42 84 34 62 www.cleanis.com | Dystrybutor w Polsce: ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. Ul. Poleczki 29 02-822 Warszawa Tel. 22 855-30-79 Fax. 22 855-34-97 www.elmiko.pl |
|---|--|

Data aktualizacji instrukcji: 07.04.2014r.