



DESCO CLEANER

Proszkowy środek do mycia narzędzi

- Doskonała siła mycia
- Polecany do stosowania w myjniach ultradźwiękowych
- Charakteryzuje się szybkim działaniem



TYP PREPARATU

Desco Cleaner jest proszkowym środkiem do szybkiego i gruntownego, samoczynnego mycia narzędzi i przedmiotów z metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła i porcelany.

Desco Cleaner jest idealnym produktem do stosowania we wszystkich dziedzinach medycznych i laboratoriach, szczególnie przy wysokim narażeniu na zabrudzenie pozostałościami białka i krwi.

ZASTOSOWANIE

Desco Cleaner może być stosowany do wszelkiego rodzaju narzędzi medycznych i laboratoryjnych tj. misek nerkowatych, pincet, nożyczek i cęg, do aparatów inhalacyjnych, materiałów z tworzywa sztucznego, szkieł laboratoryjnych, mózdzierzy, porcelany, węży, butelek mierniczych, miednic, komór do liczenia krwinek i instrumentów dentystycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Myte przedmioty natychmiast po użyciu włożyć do roztworu i pozostawić w nim na 10-20 minut. Wszystkie myte powierzchnie i zagłębienia muszą być całkowicie zanurzone. W razie uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę i / lub czas reakcji. Roztwór wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Po wyjęciu z roztworu narzędzia spłukać dokładnie bieżącą wodą.

Desco Cleaner nadaje się także do stosowania w myjniach ultradźwiękowych.

STEŻENIA UŻYTKOWE

W zależności od zabrudzenia 0,5-1,0%

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Forma / kolor: proszek, jasno zielony
Wartość pH: roztwór 1 % 12 +/- 0,5

SKŁAD

Składniki zgodnie z wytycznymi EU dot. detergentów:

Niejonowe tenzydy (< 5 %), anionowe tenzydy (5-15 %) fosfaty (> 30 %)

Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie	Jedn. sprzedaży	Nr. katalogowy
1 kg puszka z miarką	6 x 1 kg	115000-001L
5 kg wiadro z miarką	1 x 5 kg	115000-005L

DOZOWANIE

Do sporządzenia roztworu roboczego:

0,5 %: 1 łyżeczka miernicza na 6 litrów wody

Do sporządzenia roztworu roboczego:

1,0 %: 1 łyżeczka miernicza na 3 litry wody

UWAGI

Nie spożywać. Chronić skórę i oczy. W razie kontaktu z oczami spłukać natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawiczki i okulary ochronne.

Desco Cleaner nie jest dodatkowym środkiem do dezynfekcji. Dodatkowym środkiem do dezynfekcji jest **Descotonem Forte** i **Descotonem Extra** kompatybilne z **Desco Cleaner**. Czas przydatności wynosi wówczas 1 dzień.

REJESTRACJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: **PL/DR 001383**.

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld