



DESCOPRENT

Środek do dezynfekcji odlewów

- Nie wpływa na dokładność wymiarową materiału
- Nie niszczy powierzchni
- Posiada dobre właściwości myjące



CE 0482

- ✓ nie zawiera fenoli
- ✓ nie zawiera formaldehydu



TYP PREPARATU

Gotowy roztwór do szybkiej i delikatnej dezynfekcji i mycia odlewów poprzez zanurzenie na bazie aldehydów i QAV. **Descoprent** dezynfekuje, nie wywierając negatywnego wpływu na wymierne właściwości powierzchni. Descoprent jest środkiem bezbarwnym i bezzapachowym, wolnym od formaldehydu i fenoli.

ZASTOSOWANIE

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i dokładnego mycia części techniczno-dentystycznych i materiałów protetycznych jak odlewy z polimeru, silikonu A/C, alginianów, hydrokolidów i innych materiałów dentystycznych.

ZASTOSOWANIE

Formy alginianowe i hydrokolidowe należy zanurzyć na chwilę, a następnie pozostawić na 10 min do wyschnięcia. Wyciski z innych materiałów zanurzyć w roztworze na 10 min. a następnie spłukać wodą. Gotowy do użycia roztwór jest stabilny do 14 dni, w przypadku silnego zanieczyszczenia roztwór należy wymienić natychmiast.

MIKROBIOLOGIA

Descoprent działa:

- bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
- prątkobójczo
- grzybobójczo (C. albicans), drożdżobójczo
- wirusobójczo włącznie z HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia, grypa, Rota (wg wytycznych RKI)

CZAS DZIAŁANIA

B (włącznie z MRSA), F (C. albicans)/ drożdże wg DGHM / VAH przy dużym obciążeniu	konc.	5 min.
Tbc	konc.	15 min.
skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych, w tym: HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, grypa	konc.	10 min.
Vaccinia	konc.	1 min.
Rota	konc.	5 min.
HBV / HIV	konc.	1 min.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera:

Pentandial	0,01 g
Ethandial	0,20 g
Chlorek dimetylobenzyloamony	0,48 g

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu:	jasno niebieski płyn, klarowny
Wartość pH koncentratu:	5,5 +/- 1,0
Gęstość (20°C):	1,000 +/- 0,003 g/ ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr katalogowy
5 L kanister	3 x 5 L	813000-005L

DOZOWNIKI

kran do kanistra, otwieracz do kanistra.



DESCOPRENT

Środek do dezynfekcji odlewów

UWAGI

Stosować rękawice ochronne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą natychmiast spłukać dużą ilością wody. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie spożywać.

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg VAH/ DGHM 12.06.2006.

Dr. Suchomel, higienista, Wien: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg VAH/DGHM 17.11.2008.

Dr. Steinmann, Brema: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów: Vaccinia z dn. 07.01.2010; BVDV dn. 19.08.2003; Rota z dn. 24.03.2000; HBV z dn. 10.04.2000.

Weber & Partner, technik dentystyczny, Hamburg: Testy tolerancji materiałowej materiałów do odlewów.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/VAH.

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: **PL/DR 000715**

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld