



DESCOSUC CLEANER

- ✓ nie zawiera aldehydów
- ✓ nie zawiera fenoli

Środek do mycia dentystycznych systemów ssących

- Doskonała siła mycia
- Niskopieniący
- Intensywny środek do mycia – dodatek do preparatu Descosuc



TYP PREPARATU

Płynny koncentrat do regularnego i intensywnego mycia dentystycznych systemów ssących zarówno z jak i bez zintegrowanego separatora amalgamatu, spluwaczek i ślinociągów. Może być używany do dezynfekcji i mycia wszystkich rodzajów dentystycznych systemów ssących. **Descosuc Cleaner** gwarantuje optymalne mycie oraz bezawaryjną pracę układu ssącego.

SPOSÓB UŻYCIA

Descosuc Cleaner stosuje się raz lub dwa razy tygodniowo. W zależności od zabrudzenia odmierzyć od 50 ml do 100 ml **Descosuc Cleaner** i wymieszać z 1 litrem wody. Zaleca się przygotowanie 2 litrów roztworu roboczego przed rozpoczęciem pracy (mycie systemu ssącego można wykonać na przykład podczas przerwy w wykonywaniu pracy). Należy 2/3 roztworu roboczego zassać przez rurki aparatury odsysającej a pozostała 1/3 część roztworu wlać do miski spluwaczki. Najlepszy efekt czyszczący osiąga się przy czasie ekspozycji od 1,5 do 2 godz. Po wymaganym czasie należy delikatnie przepłukać system czystą wodą w celu całkowitego usunięcia z systemu powstałych zanieczyszczeń.

CZAS DZIAŁANIA

Normalny poziom zanieczyszczenia: 5%
wysoki poziom zanieczyszczenia: do 10%

Czas ekspozycji: od 1,5 do 2 godzin, w zależności od poziomu zanieczyszczenia.

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: jasny, żółtawy roztwór
Wartość pH koncentratu: ok. 1,7 +/- 0,5
Gęstość (20°C): ok. 1,058 g/ ml

SKŁAD

Kwasy organiczne, środki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje ułatwiające rozpuszczanie.

UWAGI

Powoduje poważne oparzenia. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr katalogowy
5 L kanister	3 x 5 L	818000-005L

DOZOWNIKI

kran do kanistra, otwieracz do kanistra, pompka dozująca

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld