



## ORANGE SOLVENT

### Naturalny olej myjący

- Z naturalnego oleju pomarańczowego
- Nie zawiera zasad ani mydła
- Natłuszcza



#### TYP PREPARATU

**Orange Solvent** jest gotowym do użytku roztworem myjącym do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z cynku i eugenolu na wyposażeniu, narzędziach. Oszczędny w stosowaniu.

#### ZASTOSOWANIE

**Orange Solvent** skutecznie usuwa:

- pastę cynkową i eugenolową oraz resztki alginianu i cementu z łyżek odciskowych i innych narzędzi,
- plamy jodu i inne barwne plamy po zabiegach operacyjnych,
- uporczywe naklejki i stare etykiety oraz resztki kleju (dają się łatwo usunąć po krótkim czasie działania),
- plamy olejowe z rąk oraz odzieży, dywanów i tapicerki,
- uporczywe paski i pręgi na posadzkach z PCV i linoleum,
- resztki tłustych pisaków i markerów,
- resztki pasty cynkowej i gipsu z opatrunków.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Skropić ściereczkę lub kłębek waty i przetrzeć mytą powierzchnię.

**Uwaga:** Tolerancja materiałowa nie jest gwarantowana dla wszystkich tworzyw sztucznych, szczególnie dla amorficznych termoplastów jak szkło akrylowe lub polikarbonat. Przed pierwszym użyciem konieczne należy sprawdzić tolerancję w niewidocznym miejscu.

#### SKŁAD

Naturalne terpeny pomarańczowe z wyciśniętych skórek pomarańczy, oleinian decylu.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr artykułu
250 ml butelka	9 x 250 ml	805000-250M
500 ml butelka	6 x 500 ml	805000-500M

#### REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

#### UWAGI

Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

#### PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
D-34323 Malsfeld