



## INSTRUMENTENMILCH

✓ nie zawiera fenoli

### Emulsja do pielęgnacji narzędzi

- Oparty na białym oleju medycznym
- Do stosowania także przed sterylizacją parową
- Optymalne smarowanie części ruchomych



### TYP PREPARATU

**Instrumentenmilch** jest emulsją do samoczynnej manualnej i mechanicznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i przedmiotów z metalu.

### ZASTOSOWANIE

**Instrumentenmilch** stosuje się do pielęgnacji wszystkich metalowych narzędzi lekarskich i dentystycznych zarówno w kąpeli zanurzeniowej jak i w myjniach automatycznych.

#### Instrumentenmilch:

- pielęgnuje poprzez tworzenie cieniutkiej powłoki ochronnej na powierzchniach narzędzi,
- dzięki zastosowaniu medycznych białych olejów nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym
- wyjątkowo oszczędny w stosowaniu,
- pozwala zaoszczędzić czas, po jego zastosowaniu nie jest potrzebna żadna dodatkowa pielęgnacja.

Należy pozwolić skapać nadmiarowi oleju po wyjęciu instrumentów z maszyny lub kąpeli. Potem wysterylizować- jeżeli jest to konieczne.

### STĘŻENIE UŻYTKOWE

W myjniach automatycznych: 0,3g na litr wody\*

W kąpeli zanurzeniowej: roztwór 3 %

\* Postępuj według instrukcji producenta urządzenia!

### SKŁAD

Biały olej medyczny, emulgatory oleju w wodzie, woda

### DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wartość pH 5,5 + / - 0,5

Gęstość w temp. 20°C 0,950 +/- 0,010 g/ml

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| Pojedyncze opakowania | Jedn. sprzedaży | Nr katalogowy |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 5 L kanister          | 3 x 5 L         | 106000-005L   |

### DOZOWNIKI

Pompka dozująca do kanistra 5-litrowego, kran do kanistra.

### UWAGI

Nie połykać. Chronić skórę i oczy. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć! Czasem może nastąpić rozdzielenie się faz, dzięki mocnemu wstrząśnięciu ponownie powstanie emulsja, co niema wpływu to na jakość produktu.

### REJESTRACJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych : **PL/DR 001379**

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

### PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld