



THERMOTON® NKB

✓ *neutralne pH*

Neutralny środek do płukania i mycia

- skraca czas suszenia
- zapobiega powstawaniu smug i zacieków
- odpowiedni do mycia materiałów wrażliwych na korozję



TYP PREPARATU

Thermoton® NKB jest płynnym środkiem do użytku maszynowego przeznaczonym do płukania i mycia łóżek, stolików przyłóżkowych, wózków, pojemników wielokrotnego użytku oraz narzędzi.

Thermoton® NKB w zależności od zastosowanego stężenia może być używany zarówno do mycia jak i do końcowego płukania. W przypadku silnych zabrudzeń zaleca się stosowanie dodatkowego środka myjącego **Thermoton® NR**. Ze względu na neutralne pH oraz silne inhibitory korozji **Thermoton® NKB** gwarantuje szeroką kompatybilność materiałową. Produkt znacznie skraca czas suszenia oraz zapobiega powstawaniu smug i zacieków. Roztwór zachowuje stabilność przy twardości wody do 35°dH.

ZASTOSOWANIE

Thermoton® NKB jest stosowany do mycia i płukania łóżek, stolików przyłóżkowych, wózków, pojemników wielokrotnego użytku oraz narzędzi w automatycznych myjniach-dezynfektorach.

SPOSÓB UŻYCIA

Materiały należy włożyć do myjni - zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny). W procesie mycia wszystkie powierzchnie i zagłębienia muszą być dostępne. W celu przeprowadzenia procesu końcowego płukania należy stosować **Thermoton® NKB** zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

STĘŻENIA UŻYTKOWE

Jako środek do płukania końcowego 0,01-1 ml/L
 Jako środek myjący (w zależności od stopnia zabrudzenia) 2-5 ml/L

SKŁAD

Specjalne środki zwilżające, inhibitory korozji, czynniki kompleksujące, środek ułatwiający rozpuszczanie.

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: przezroczysta, bezbarwny roztwór
 Wartość pH koncentratu 7,55 +/- 0,1
 Gęstość (w 20°C) : 0,9905 +/- 0,0005 g/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr katalogowy
5 L kanister	3 x 5 L	128000-005L

AKCESORIA

Kran do kanistra, klucz do kanistra.

UWAGI

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie spożywać.

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
 Am Roggenfeld 3
 D-34323 Malsfeld