

## **HLT\_20M**

### **FANTOM DO TESTÓW PODSTAWOWYCH KONTROLI JAKOŚCI APARATÓW DO MAMMOGRAFII CYFROWEJ**

Fantom określający jaka grubość położonej przy ścianie klatki piersiowej tkanki może zostać utracona na obrazie.

Fantom jest listwą z PMMA długości 300 mm z umieszczonymi prostopadle do długiej krawędzi trzema rzędami po 20 kulek stalowych średnicy 1.0 mm. Na obrazie fantomu ułożonego przy krawędzi stolika Bucku od strony ściany klatki piersiowej mogą być niewidoczne co najwyżej 2 kulki (2 mm utraconej grubości tkanki) zaś na obrazie fantomu ułożonego przy krawędzi stolika Bucku od strony bocznej mogą być niewidoczne co najwyżej 4 kulki (4 mm utraconej grubości tkanki).

Fantom ma listwę pozycjonującą fantom przy krawędzi stolika Bucku od strony ściany klatki piersiowej, pozwalającą jednak na ułożenie fantomu w sposób dowolny przy testach krawędzi bocznych stolika Bucky

***Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 92/59 EWG Bezpieczeństwo Produktów Powszechnego Użytku (92/59/EEC General Product Safety Directive)***

wszelkich informacji udziela  
**Himtech Norbert Wasilewski**  
tel. 602108829, fax. 222034686  
info.himtech@gmail.com